

### 多参数监护仪质量检测原始记录表

检测人:		检测日期:		检测类别:	<input type="checkbox"/> 新购验收 <input type="checkbox"/> 周期性检测 <input type="checkbox"/> 维修后检测				
使用科室:		放置地点:		设备编号:	负责人:	联系电话:			
制造厂家:		型号规格:		环境条件:	温度:	相对湿度:			
外观检查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	监护仪基本标识应有生产厂家、型号、出厂日期及编号、电源额定电压等。							
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外观完好, 附件齐全。							
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	设备按钮、旋钮及触摸屏等功能正常。							
性能检测									
心率 (次/分)	设定值	30	60	90	120	180	允许误差	结果	
	测量值						± (示值 5%±1) 次/分	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
呼吸率 (次/分)	设定值	10	20	40	60	80	± (示值 5%±1) 次/分	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	测量值								
血氧饱和度 (%)	设定值	80	90	95	97	100	±3% (直接加减, 非比例)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	测量值								
NIBP 静态压力 (mmHg)	模拟器	50	100	150	200	250	首次检测: ±3mmHg; 使用中检测: ±4mmHg	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	测量值								
血压示值 重复性(mmHg)	设定值	成人: 150mmHg/100mmHg, 80BPM; 儿童: 60mmHg/30mmHg, 120BPM				重复性	≤5mmHg	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	5次测量值								
气密性	测试条件:	测试压力: 200mmHg; 测试时间: 5min			泄露率:		≤6mmHg/min	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
电气安全检测									
接地电阻	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	绝缘阻抗 (Main-AP)	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤300 mΩ					≥10 MΩ		
对地漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外壳漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤5 mA					≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 零线断开)					限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		≤10 mA					≤500 μA		
应用部分 漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	应用部分 辅助漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		CF≤10 μA /BF≤100 μA					CF≤10 μA /BF≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)					限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		CF≤50 μA /BF≤500 μA					CF≤50 μA /BF≤500 μA		
安全报警功能检查									
心率限值报警	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			呼吸频率限值报警	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用				
心律失常报警	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			血氧饱和度限值报警	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用				
无创血压限值报警	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			静音功能	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用				
测试结果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			备注					